

NX-1300 Használati útmutató

Az NX-1300 digitális alkoholszonda egyéni véralkoholszint mérésére szolgál.

A csomag tartalma:

- 1 db NX-1300 digitális alkoholszonda
- 2 db AA alkáli elem
- 2 db műanyag fúvóka

- magyar nyelvű leírás

Bekapcsolás: Hajtsa ki a készülék tetején található műanyag befúvócsövet és helyezzen rá egy műanyag fúvókát. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék oldalán. Egy sípoló hangjelzés után elkezdődik a bemelegedés és a félvezető érzékelő önkalibrációja, ami a kijelzőn is követhető, mert elindul a visszaszámlálás 10-től. A számláló a bemelegedés végéig ciklikusan számlál.

Mérésre kész: A bemelegedés végén a számláló leáll, a tizedespont kigyullad valamint egy sípolás jelzi, hogy a készülék mérésre kész.

Befúvás: Vegye a szájába a fúvókát és kezdjen el folyamatosan fújni legalább 5 másodpercig. Egy folyamatos sípoló hang jelzi, hogy a mintavétel folyamatban van. A sípolás leállása a mintavétel befejezését jelzi. A mérési eredmény ezután jelenik meg a kijelzőn.

Ha a mérésre kész állapotban 8 másodpercig nem indul meg a befúvás, akkor a kijelzőn 0.0 érték jelenik meg, ami azt jelenti, hogy nem volt mérhető alkoholtartalom. Ugyanez történik, ha a kilélegzett levegőben egyáltalán nem található alkoholgőz. Ilyenkor a mérési folyamat nem indul el, hangjelzés nincs és a befúvás után 0.0 jelenik meg a kijelzőn.

Leolvasás: A készülék mérési tartománya 0,0 – 4,0 ‰ (ezrelék). A villogó H betű azt jelenti, hogy a mért érték magasabb, mint 4 ‰.

Kikapcsolás: A készülék 15s elteltével automatikusan kikapcsolódik.





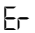
Új mérés: Új mérést mindig a kikapcsolt készülék bekapcsolásával indíthatunk!

A mérések között legalább 1 perc regenerálódási idő ajánlott.

**Ne használja az alkoholszondát szeles időben vagy poros környezetben!
Vegye ki az elemet, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a szondát!**

Jelzések és figyelmeztetések

Figyelmeztető jelzés: A mérés után a villogó kijelző és a szaggatott hangjelzés arra figyelmeztet, hogy a véralkoholtartalom meghaladja a 0,5 ezreléket.

-  az érzékelő nem kész a mérésre, indítsa újra a készüléket.
-  az érték azt jelenti, hogy nem fogyasztott alkoholt illetve az alkoholszint 0,1 ‰ alatt van.
-  a véralkohol-tartalom magasabb, mint 4 ‰.
-  A villogó „LO” felirat arra figyelmeztet, hogy az elem kimerülőben van.
-  Érzékelő hiba. Forduljon a forgalmazóhoz.

Fontos tudnivalók

1. A dohányzást illetve alkoholfogyasztást követő közvetlen mérés hamis eredményre vezethet. Ezért ne mérjen alkoholfogyasztás után min. 15 percig és dohányzás után min. 3 percig.
2. Csak alkalin elemeket használjon. Amint a készülék alacsony elemfeszültséget jelez, cseréljen elemet.
3. Ha igen magas alkoholszintet mért (2 ezrelék felett), akkor hagyjon 3-5 perc regenerálódási időt az új mérés előtt.
4. Az alkohol egyénenként különböző mértékben hat a képességekre és viselkedésre. Az ittas vezetésből származó balesetekért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget, mivel a Magyarországon megengedett véralkoholszint 0,0 ‰!

A készüléket tiszta, száraz helyen kell tárolni az érzékelő védelme érdekében.

Garancia

Az NX-1300 digitális alkoholszondára 1 év – telephelyünkön érvényes – garanciát vállalunk.

Műszaki adatok:

Méreték:	100 x 39 x 17 mm
Tömeg:	36 g
Burkolat:	ütésálló műanyag
Kijelző:	0,4" kétszámjegyű LED
Tápellátás:	2 db AAA alkáli elem
Elem élettartam:	100-150 mérés (becsült adat, függ az elem fajtájától)
Bemelegedési idő:	10 s
Befűvási idő:	5 s
Mérési tartomány (véralkoholszint):	0,0 – 4,0 ‰
Pontosság:	± 0,1 ‰
Működési hőmérséklet:	10 – 40 ° C

Figyelmeztetés! Az emberi szervezetben az alkohol lebomlása bonyolult biokémiai folyamat, ami személyenként nagy különbségeket mutat. Az autóvezetési és munkavégzési képesség megítélésében nagy segítséget jelent az alkoholszonda. A mérési eredményre alapozva felelősségteljes döntés hozható.

Ne feledje azonban, hogy a kilélegzett levegő alkoholtartalmának mérése csak tájékoztató adat és a perdöntő érték mindig a vérből meghatározott alkoholszint. A döntést mindig Ön hozza és a döntésből származó következményekért sem az alkoholszondák gyártója, sem a forgalmazók nem vállalnak felelősséget.

**HUMANsoft AHT Kft. 1155 Budapest, Tóth István u. 105. Tel.: 1-414-4040 Fax: 1-414-4049
www.alkoholszonda.info www.adapter.hu www.noxalc.hu**

www.adapter.hu

ITT AZONNAL MEGKAPJA, AMIT LÁT.